

# Kurzbedienungsanweisung KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C.




Immer auf der sicheren Seite.



KaVo. Dental Excellence.

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C

 Die Kurzbedienungsanweisung beinhaltet ausschließlich die wesentlichen Bedienungsfunktionen. Sie ersetzt nicht die zum Lieferumfang gehörende Gebrauchsanweisung. Diese ist zur Vermeidung von Störungen und Schadensfällen unbedingt zu beachten.

Patientenstuhl

Bedienelement

## Automatikposition speichern

Gewünschte Stuhlposition manuell einstellen.



oder

Bei abgelegten Instrumenten gewünschte Stuhlposition einstellen.



Ziel-Taste betätigen, bis akustisches Signal ertönt.



# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

## Patientenstuhl

## Bedienelement

Belegung der AP-Tasten am  
Multi-Fußbedienelement

Fußtaster und gewünschte AP-Taste  
gedrückt halten und zusätzlich  
gewünschte Zieltaste am Helfer-  
element betätigen, bis akustisches  
Signal ertönt.



## Automatikposition abrufen.

Gewünschte Automatikposition-  
Taste kurz betätigen.



oder

Bei abgelegten Instrumenten  
gewünschte Automatikposition abrufen.



Bei eingeschwenkter Speifontäne ist die  
Bewegung des Stuhles begrenzt.

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C


Kopfstütze motorunterstützt

Bedienelement

## Bedienung über den Joystick

Stammlänge: oben / unten

Neigung: links / rechts

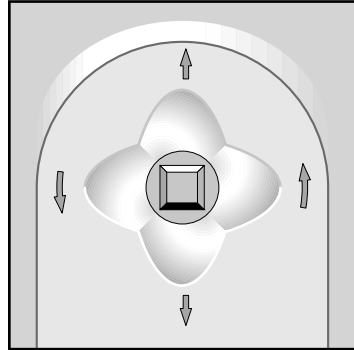

## Sonderfunktionen

Einmaliges Drücken:

Für kleine Personen (Kompensation aus)

Zweimaliges Drücken:

Stellung AP Kinderbehandlung

## Programmierung

Stuhl und Kopfstütze in gewünschte Position bringen und dann auf der gewählten AP-0 bis AP-2 und SP abspeichern.

## Motorisches Patiententeil


## Speicherung mit SP

Das Patiententeil schwenkt nach Beenden der Stuhlbewegung in die Spülposition

oder

## Speicherung mit AP0, AP1 oder AP2

Das Patiententeil schwenkt in die Ruheposition vor Ablauf der Automatikposition

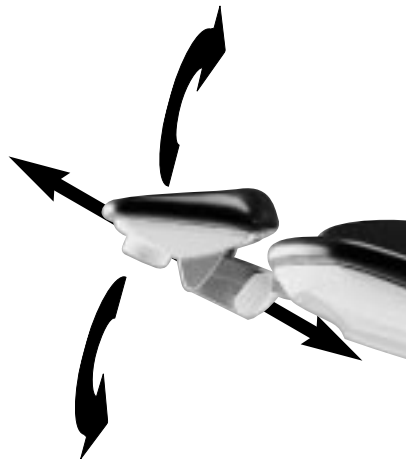

# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C


Menüvorwahl

Bedienelement / Anzeige

Gewünschtes Menü  
einstellen.


**Patienten-Menü**

Taste betätigen

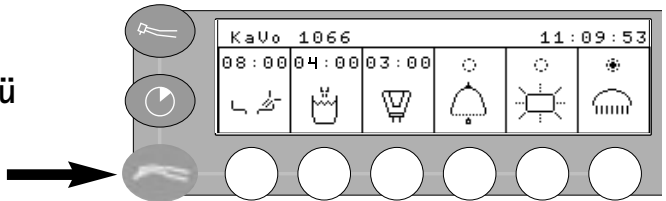


**Timer-Menü**

Taste betätigen

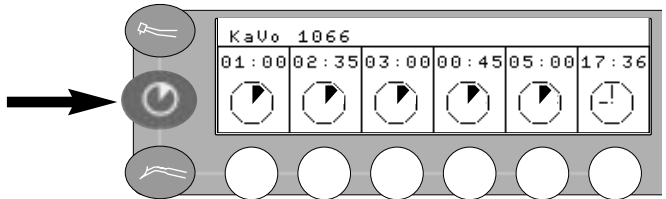

**Memodent-Menü**

Taste betätigen

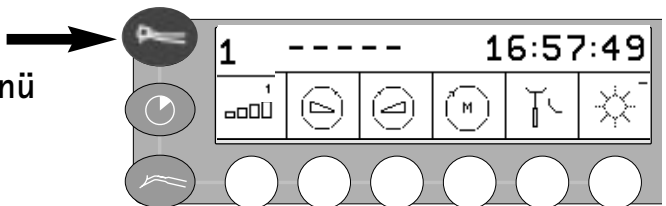


# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C

## Vorzugsmenü programmieren

Bügelschalter und entsprechende Menü-Taste gleichzeitig betätigen (4 Sekunden).

Eingestelltes Vorzugsmenü wird abgespeichert und mit akustischem Signal quittiert.

## Bedienelement / Anzeige

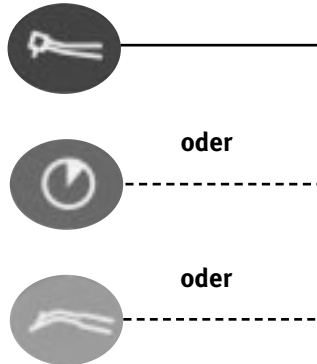

Das vorgewählte Menü erscheint nach jedem Einschalten des Gerätes und nach Ablegen der Instrumente.


# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

## Einstellungen


## Bedienelement / Anzeige

### Einstellung speichern.

Wahlweise Taste S1...S3  
betätigen (4 Sekunden).

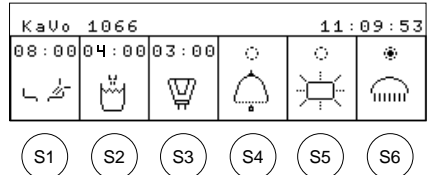


Anzeige wechselt in das Einstellmenü.  
Gewählte Funktion erscheint invers.  
Gewünschten Wert einstellen.  
Taste S3: Wert kleiner.  
Taste S4: Wert größer.

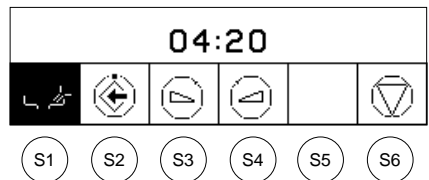

Taste S2 kurz betätigen.  
Eingestellter Wert wird abgespeichert  
und mit akustischem Signal quittiert.



Bei Korrekturen:  
Taste S6 kurz betätigen.  
Vorgang wird abgebrochen.

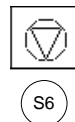


**i** Die Speicherung der Einstellungen erfolgt in sämtlichen Menüs nach diesem Beispiel. Nach jedem Abspeichern eines Wertes wechselt die Anzeige zurück in das gewählte Menü.

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C

## Patienten-Menü


## Bedienelement / Anzeige

Zeiteinstellung von Schalen-  
spülung, Mundglasfüllung  
und Hydrocolloid.

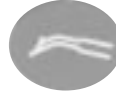

## Funktion abrufen.

Taste S1...S3 kurz betätigen.  
Funktion wird aktiviert.  
Durch nochmaliges Betätigen  
wird die Funktion abgebrochen.  
(Ausnahme S4: Funktion ist nur  
aktiv während Tastenbetätigung)

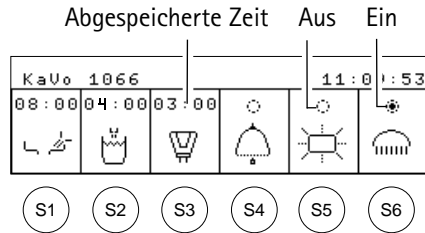

**i** Hydrocolloid kann bis max. 8,5 Minuten  
abgespeichert werden. Schale und Mundglas bis  
max. 51 Sekunden.



# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

## Timer-Menü

Einstellung von Timern und Uhrzeit (Echtzeit)


## Bedienelement / Anzeige



## Funktion abrufen.

Taste S1...S5 kurz betätigen.  
Timer wird gestartet.  
Durch nochmaliges Betätigen wird der Timer wieder gestoppt.  
Nach Ablauf des Timers ertönt ein akustisches Signal.

Im Einstellmenü (Taste S5) kann ein hoch- oder herunterzählender Timer eingestellt werden.

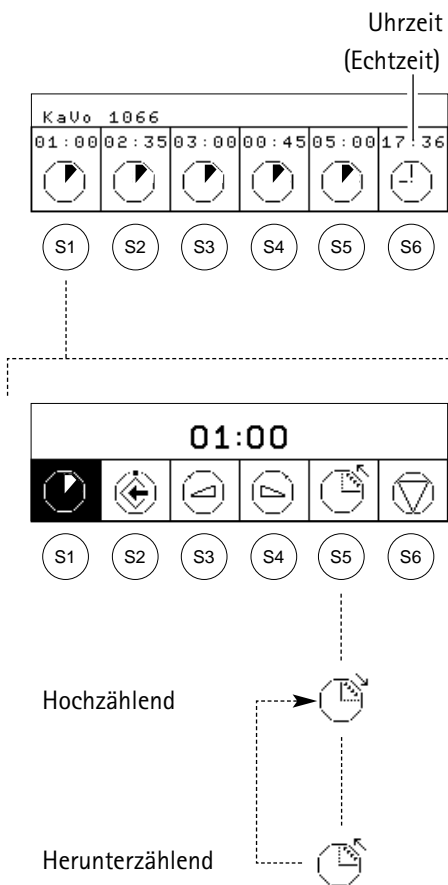

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C

## Memodent Menü

## Bedienelement / Anzeige


Einstellung instrumentenspezifischer Werte (Drehzahl, Intensität...)



## Arzt-/Programm Ebenenwahl.

### Arzt 1 – Arzt 2 wählen.

Taste S1 bei abgelegten Instrumenten betätigen bis akustisches Signal ertönt (4 Sekunden).

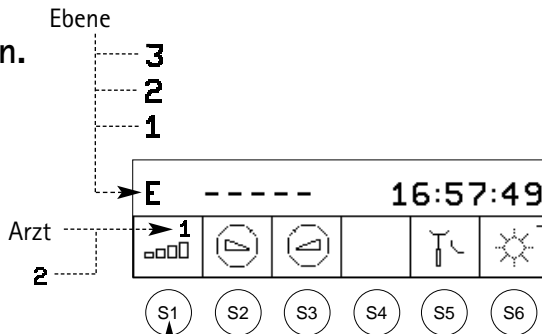


### Ebene wählen.

Taste S1 kurz betätigen oder Fußtaster bei abgelegten Instrumenten betätigen. Nächste Ebene wird angezeigt.



### Instrumentenwerte speichern.

Bei gezogenem Instrument Taste S1 betätigen bis akustisches Signal ertönt (4 Sekunden). Mit Tasten S2-S6 Werte einstellen. Mit Taste S1 abspeichern.

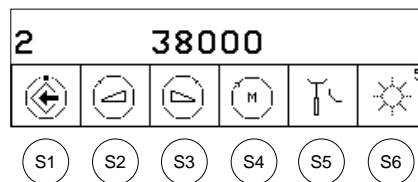


**i** Jedes Instrument kann auf den Ebenen 1–3 individuell programmiert werden. In der Ebene E können Drehzahl- und Intensitätswerte nicht gespeichert werden.

# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

## Instrumentenspezifische Werte abrufen.

## Bedienelement / Anzeige

Instrument entnehmen.  
Ebene vorwählen.  
Abgespeicherte Werte werden angezeigt.

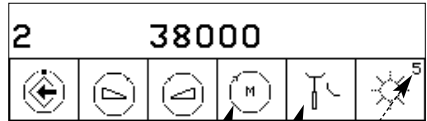

Bei Motor:  
Drehrichtung ändern.



oder  
Taste S4

 Linkslauf

Bei MF-Spritze:  
Heizung für Luft und Wasser  
Ein- / Ausschalten.

 aus

 ein

Bei Elektro Chirurgiegerät:  
Intensität regulieren.  
0,25(min), 0,50...10,00(max), auto

 AUTO

Automatikbetrieb

Bei Motor/Turbine:  
Kühlzustand einstellen.




oder  
Taste S5

 Luft

 Spray

Kaltlichtintensität einstellen.  
-(Aus), 1(min), 2...9(max)

 -, 1 ... 9

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C


## Programmierung der Funktionstasten

Taste F1 betätigen (4 Sekunden).  
Anzeige wechselt in das F-Tastenmenü.


A = F-Tasten Helferinelement  
B = F-Tasten Arztelement

Wahlweise Taste S1...S6 betätigen.  
Programmierbare Funktionen werden angezeigt.


## Bedienelement / Anzeige

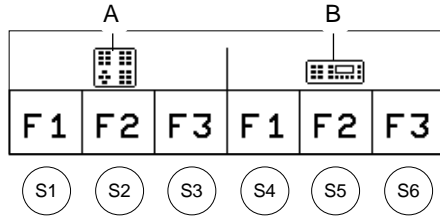

Weiterschalten der Anzeige:  
Taste S6 betätigen.

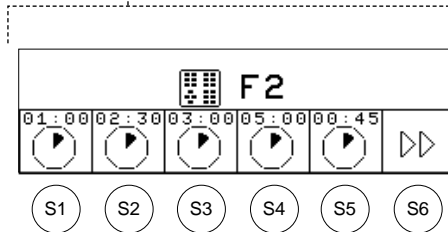

Gewünschte Funktion durch Betätigen  
der Tasten S1...S5 auswählen.

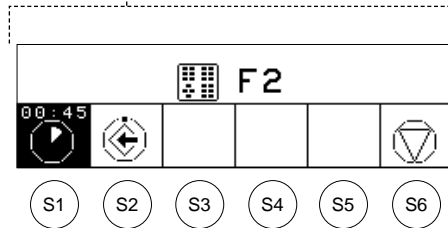

Funktion abspeichern.  
Taste S2 betätigen.



# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

Hydroclean-Funktion.

Bedienelement / Anzeige

## Funktion abrufen.

Taste Amalgamabscheider betätigen (Vorbereitung). LED blinkt.  
Saugschläuche inaktiv (in Ablagen).  
Taste nochmals betätigen.  
Hydroclean-Funktion wird gestartet.  
LED leuchtet. Durch nochmaliges Betätigen wird die Funktion abgebrochen.



**i** Durch diese Funktion werden die Saugleitungen (vom Filtergehäuse bis zum Abscheidesystem) durch Aktivieren der Selektivventile und der Saugmaschine vollautomatisch für ca. 150 Sekunden mit reinem Wasser durchgespült. Die Schalenspülung wird dabei mehrmals ein- bzw. ausgeschaltet.

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C

Hydroclean-Funktion mit Tubewashing.

Bedienelement / Anzeige

## Funktion abrufen.

Taste Amalgamabscheider betätigen (Vorbereitung). LED blinkt. Saugschläuche auf Tubewashingvorrichtung aufsetzen. Taste nochmals betätigen. Tubewashing-Funktion wird gestartet. LED leuchtet. Durch nochmaliges Betätigen wird die Funktion abgebrochen.



Saugschläuche, Abfluß und Abscheidesystem werden in einem Arbeitsgang durchgespült.

# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

## Intensiventkeimung

## Bedienelement / Anzeige


### Funktion vorbereiten.

Taste betätigen bis Signalton ertönt und die LED für die Entkeimungsanforderung blinkt.

Instrumente in die Haltevorrichtung auf der Speischale stecken. Saugschläuche auf die Tubewashingvorrichtung aufsetzen.



Anforderung  
Intensiv-  
entkeimung

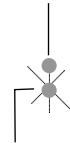

Oxygenalbe-  
hälter leer

### Funktion starten.

Taste Entkeimung betätigen.  
Die Intensiventkeimung läuft  
vollautomatisch ab.



**i** Nach dem Durchspülen der Instrumente mit hoher Oxygenalkonzentration wird der Beginn der Verweilzeit durch einen Signalton von 4 sec. und 

4.0	3.00	16:59:29
▽	▽	▽

 angezeigt. Die Verweilzeit dauert 30 min. Während dieser Zeit kann das Gerät ausgeschaltet werden. Nach Beendigung der Intensiventkeimung blinken die Geräte-LED und die Leckwasser-LED. Nach Zurücklegen der Instrumente ist das Gerät wieder funktionsbereit.

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C


Einwirkphase  
überspringen

Bedienelement / Anzeige

## Funktion.

Die Intensiventkeimung befindet sich  
in Schritt 8-5:  
Gerät aus- und wieder einschalten.  
Intensiventkeimung schaltet in Schritt 3.6  
Der automatische Spülprozess beginnt.

Die Intensiventkeimung befindet sich  
in Schritt 4:  
Intensiventkeimungstaste und  
Taste Amalgamabscheider gleichzeitig  
betätigen und gedrückt halten.

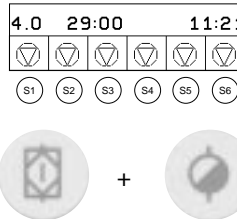

Gleichzeitig Fußtaster betätigen bis  
ein akustisches Signal ertönt.  
Intensiventkeimung schaltet in Schritt 3.6



**i** Diese Funktion ist notwendig, wenn der bereits  
gestartete Entkeimungsvorgang begonnen hat und  
der Einsatz der Behandlungseinheit unbedingt notwendig  
ist (z. B.: bei Notfall, in Kliniken usw.).

**!** Nach dem Abbruch der Intensiventkeimung ist die  
Oxygenkonzentration erhöht. Deshalb muß der  
automatische Spülprozess unbedingt durchgeführt werden  
(ca. 6 min.).



### Sicherheitsabschaltungen.

Eine Sicherheitsabschaltung ist aktiv wenn eine der LED's der Automatikpositions-Tasten blinkt.

Zuordnung:	Trittplatte	AP0	
	Sitzbank oder Abdeckung unter der Sitzbank	AP1	
	Rückenlehne	AP2	
	Helferinelement 1066R/T Arztelement 1066R	LP	
	Schwenkbare Speischale	SP	
	Bügel des Multi-Fußbedienelements	AP+	



Die Sicherheitsabschaltungen beenden sofort die jeweiligen Stuhlbewegungen.

# KaVo Estetica® Sensus 1066 R/T/C

Weitere Warnmeldungen.

Anzeige

## Oxygenalbehälter leer.

LED leuchtet und ein Signalton im zehn-Sekunden-Takt ertönt.



## Oxygenalbehälter voll.

Zehn Signaltöne im Sekundentakt.

## Amalgamabscheider.

LED leuchtet. Es wird nur auf eine Störung des Amalgamabscheiders hingewiesen. Detaillierte Hinweise ergeben das Display des Amalgamabscheiders und die zugehörige Gebrauchsanweisung.




## Schalenabsaugventil überfüllt.

LED blinkt 10 Sekunden.  
Not-Aus für Schalenabsaugventil ist betätigt.  
Wasser für Schalenpülung, Mundglasfüller und Hydrocolloid wird abgeschaltet.



# KaVo ESTETICA® Sensus 1066 R/T/C

## Funktionen Multi-Fußbedienelement.

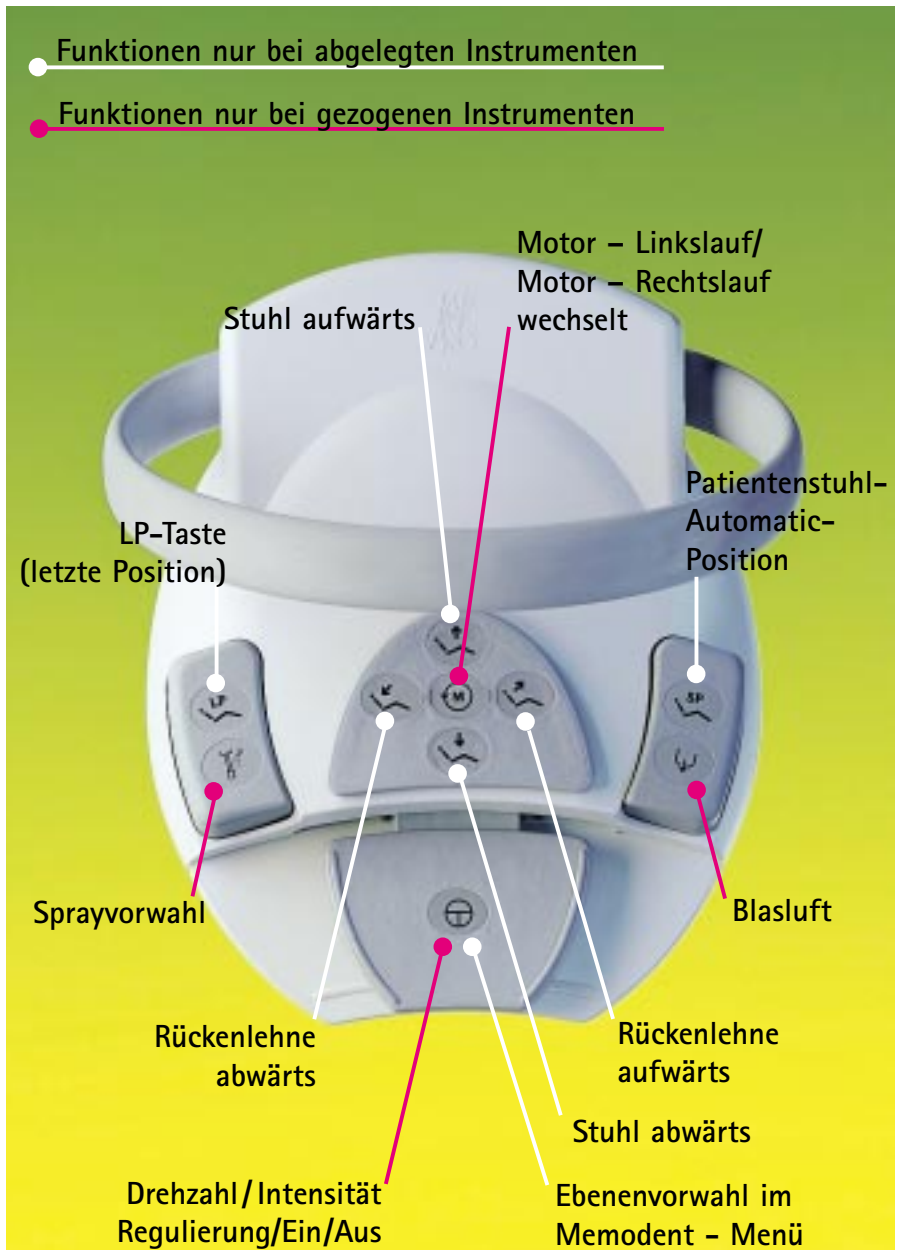



**KaVo. Dental Excellence.**

KaVo. D-88400 Biberach/Riss  
Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488  
Internet: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)